

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia	3
Popis	5
Zostavenie odsávačky a jej demontáž	7
Zdroj napájania	8
Použitie odsávačky	8
Tipy a rady na používanie odsávačky	9
Skladovanie a ohrievanie materského mlieka	9
Riešenie problémov	10
Čistenie a sterilizácia	11
Skladovanie	12
Technické špecifikácie	12
Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale	12
Likvidácia použitých batérií	13
Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom	13

Úvod

- Všeobecne je známe, že materské mlieko je prirodzenou stravou dojčiat, ktorá mu poskytuje potrebné látky na jeho rast a ochranu pred infekciami. Odsávačka materského mlieka je vhodným doplnkom výbavy pre dojčiace mamičky. Svoje uplatnenie nájde najmä v situáciách, keď nemôže mamička dojčiť sama v pravidelných intervaloch alebo keď nie je možné dojčenie priamo z prsníka, napr. z dôvodu boľavých alebo popraskaných bradaviek, a v neposlednom rade napomáha k úľave od bolestivých nadmerne natečených prs, z ktorých je potrebné odsať časť materského mlieka.
- Odsávačka Bayby BBP 1010 je vybavená 2-fázovým systémom, ktorý simuluje prirodzené cicanie bábätka. V prvej fáze sa napodobňuje rýchly cyklus cicania, ktorým sa stimuluje prsná bradavka na vyvolanie procesu vylučovania materského mlieka z mliečnej žľazy. Potom nasleduje druhá fáza, keď sa napodobňuje hlbšie a pomalšie cicanie bábätka. V tejto fáze dochádza k vylučovaniu materského mlieka z prsnej bradavky a jeho odsávaniu do fľaštičky. Stupeň intenzity stimulácie a odsávania je možné regulovať podľa potreby v 9 úrovniach.
- Prehľadný LCD displej zobrazuje nastavený prevádzkový režim, intenzitu vakuu, rýchlosť odsávania a čas zostávajúci do automatického vypnutia. Funkcia pamäte automaticky ukladá posledné nastavenie prevádzkového režimu a intenzity vakuu.
- Silikónový prsný násadec 3 v 1 v sebe kombinuje tri funkcie: masáž prsníka, jeho stlačenie a odsatie materského mlieka. To všetko prebieha súčasne, aby došlo k vyvolaniu pocitu prirodzeného dojčenia. Špeciálne navrhnutý tvar prsného násadca oddeľuje mlieko od vzduchu a zabraňuje spätnému toku mlieka.
- V základnom vybavení odsávačky je dojčenská fľaša so širokým otvorom a redukcia, ktorá umožňuje použitie dojčenských fliaš s úzkym otvorom.
- Vďaka kompaktnej veľkosti môžete mať odsávačku stále pri sebe. Tichý chod a prevádzka na sieťový adaptér alebo batérie vám umožní používať ju doma alebo na cestách.


Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia

- Odsávačku používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou nesprávneho fungovania odsávačky alebo jej poškodenia. Návod uschovajte na budúce použitie.
- S touto odsávačkou môžu manipulovať deti vo veku 8 rokov a staršie alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o tom, ako s ňou manipulovať bezpečným spôsobom, a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s odsávačkou a jej príslušenstvom nesmú hrať.
- Odsávačku používajte iba s originálnym adaptérom a príslušenstvom.
- Pred pripojením sieťového adaptéra k zdroju el. energie sa uistite, či napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke.
- Z hygienických dôvodov je odsávačka určená na opakované použitie iba jedným používateľom.
- Ak je v silikónovej hadičke **A(18)** voda, odsávačku nespúšťajte.
- Odsávačku nepoužívajte vonku, nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu ani ju neodkladajte na elektrický alebo plynový varič.
- Odsávačka nie je určená na použitie v sprche alebo vani.
- Nepoužívajte odsávačku v prípade nadmernej únavy alebo ospalosti alebo pri vedení motorových vozidiel.
- Odsávačku neodporúčame používať počas tehotenstva, pretože by mohlo dôjsť k vyvolaniu pôrodu.
- Nesnažte sa odobrať odsávačku z prsníka počas odsávania mlieka. Najprv odsávačku vypnite a až potom uvoľnite prsník z prsného násadca **A(2)**.
- V prípade, že cítite nepríjemný alebo bolestivý tlak pri odsávaní mlieka, odsávačku vypnite a prsník vyberte z prsného násadca **A(2)**. Urobte jemnú masáž a nahriatie prs v teplej sprche a potom opakujte odsávanie. Ak ťažkosti stále pretrvávajú, poraďte sa s laktačnou poradkyňou alebo so svojím lekárom.

- Odsávačku nenechávajte bez dozoru, ak je pripojená k sieťovej zásuvke.
- Ak je odsávačka napájaná z externého zdroja el. energie, po ukončení používania ju vždy odpojte od sieťovej zásuvky.
- Čistenie a sterilizáciu odsávačky robte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a sterilizácia. Motorovú jednotku a adaptér nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti nesterilizujte, pretože neprichádzajú do styku s materským mliekom ani prsníkom.
- Čistiť môžu deti, ak sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Nesmú však sterilizovať z dôvodu rizika oparenia.
- Nepoužívajte odsávačku, ak je akokoľvek poškodená, ak je poškodený jej sieťový adaptér alebo ak niektorá z častí, ktorá nesmie byť ponorená, spadla do vody alebo inej tekutiny.
- Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do prístroja sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
- Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. Odsávačku je vhodné prepravovať v originálnej škatuli.

Popis

Popis príslušenstva

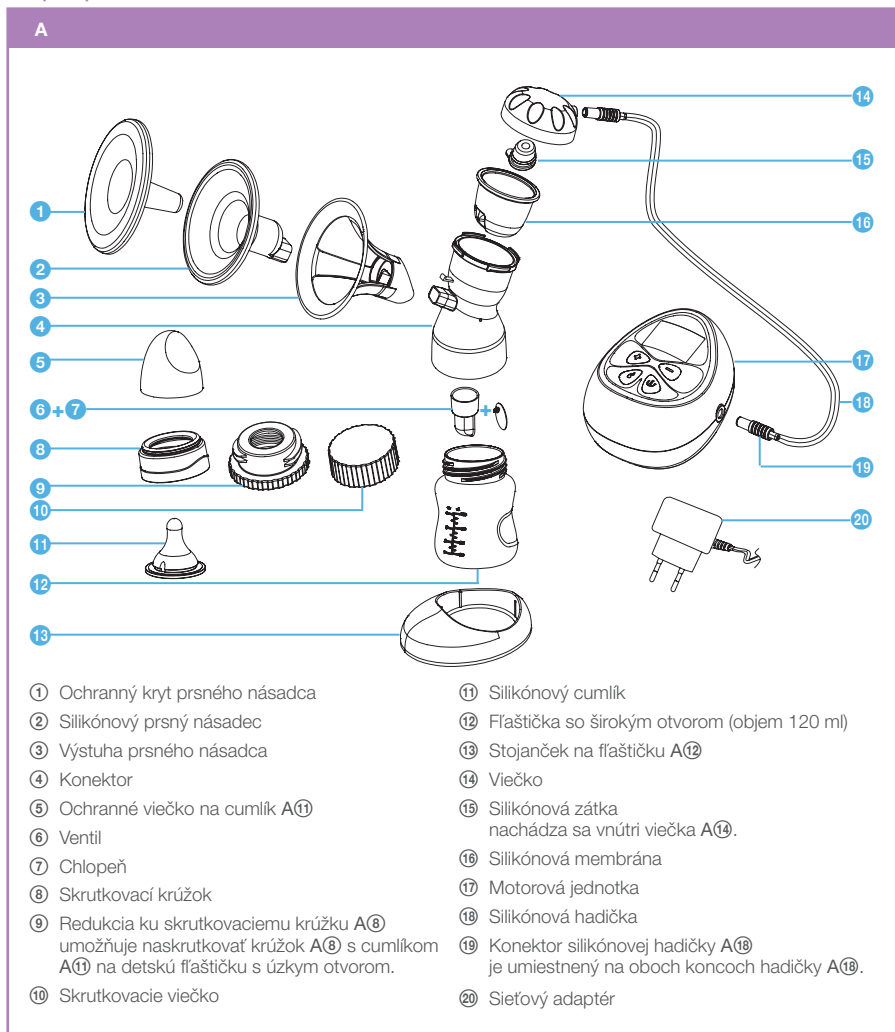


Náhradné príslušenstvo, ktoré sa nachádza v originálnom balení odsávačky:

1 ks silikónovej hadičky A⑱ + 2 ks konektora silikónovej hadičky A⑱, 2 ks chlopne A⑦.

Časti A①–⑱ sú vyrobené z materiálov, ktoré neobsahujú BPA (Bisfenol A). Pri motorovej jednotke A⑰ ide o plášť a ovládací panel.

Popis motorovej jednotky

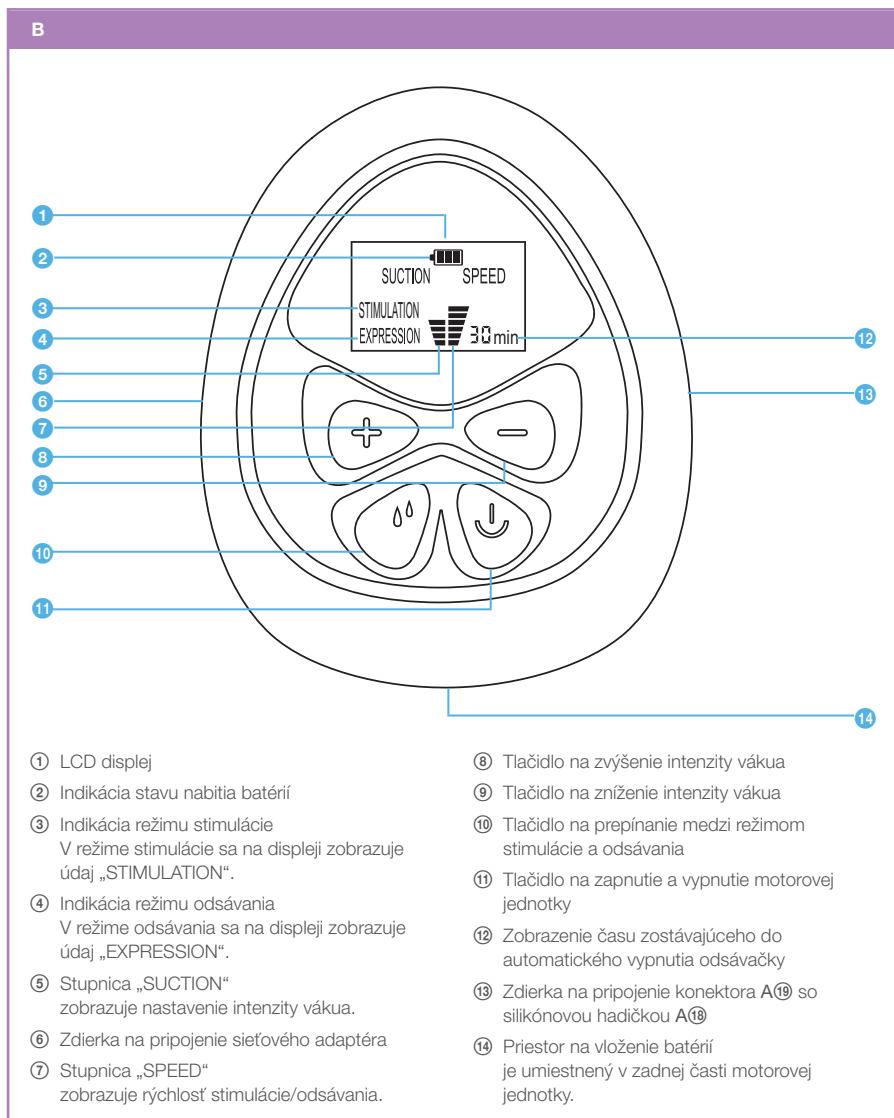

Zostavenie odsávačky a jej demontáž

- Skôr ako začnete odsávačku zostavovať, vyčistite a sterilizujte jednotlivé časti podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a sterilizácia a riadne si umyte ruky.



Upozornenie:

Motorovú jednotku A17 a adaptér A20 nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti nesterilizujte, pretože neprichádzajú do styku s materským mliekom ani prsníkom.

- Odsávačku zostavujte vždy podľa nasledujúcich pokynov. V opačnom prípade môže byť znížená intenzita vaku.
- Uistite sa, že žiadna časť odsávačky nie je poškodená alebo opotrebovaná a že všetky časti, ktoré sa použijú pri zostavovaní, sú suché. Poškodené alebo opotrebované časti musia byť nahradené novými. Pre objednanie náhradných dielov kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Prsný násadec A2 vložte do výstuhu A3 a zatlačte ho čo najďalej. Okraj stlačte prstami pozdĺž výstuhu A3, aby k nej riadne prilipol.
- Výstuhu A3 s prsným násadcom A2 priložte k hubici, ktorá je umiestnená v prednej časti konektora A4. Výstuhu A3 s násadcom A2 naklopte mierne nahor tak, aby do nej najskôr zapadol jazýček, ktorý je umiestnený nad hubicou. Potom opatrne pritlačte výstuhu A3 ku konektoru A4 tak, aby došlo k spojeniu týchto častí.
- Do vrchnej časti konektora A4 vložte membránu A16 a priklopte ju viečkom A14. Viečko A14 riadne pripevnite ku konektoru A4 pootočením v smere hodinových ručičiek. Otvor vo viečku A14, určený na pripojenie silikónovej hadičky A18 s konektorom A19, by mal smerovať na opačnú stranu od výstuhu A3 s prsným násadcom A2. K otvoru vo viečku A14 pripojte konektor A19 so silikónovou hadičkou A18.



Upozornenie:

V otvoroch viečka A14 a vnútri silikónovej hadičky A18 s konektormi A19 nesmie byť voda.

- K ventilu A6 pripevnite chlopňu A7 tak, aby výstupok v tvare polkruhu na spodnej strane chlopne A7 zapadol do otvoru vhodného tvaru vo ventilu A6. Aby chlopňa A7 riadne prilipla k ventilu A6, pritlačte ju palcom.
- Ventil A6 s chlopňou A7 upevnite do spodnej časti konektora A4.
- Na spodnú stranu konektora A4 naskrutkujte fľaštičku A12. Fľaštičku A12 umiestnite do stojančeka A13.
- Voľný koniec silikónovej hadičky A18 s konektorom A19 pripojte k zdierke B13 na pravej strane motorovej jednotky A17.
- Pri demontáži odsávačky postupujte opačným spôsobom.

Zdroj napájania

Voľba zdroja napájania

Vonkajší zdroj energie

- Používajte iba typ adaptéra **A20** (výstup 6 V $\overline{\text{---}}$, 1 A), ktorý sa dodáva s touto odsávačkou.
- Konektor sieťového adaptéra **A20** pripojte k zdierke **B6** na ľavej strane motorovej jednotky **A17**. Zástrčku sieťového adaptéra **A20** pripojte k zásuvke el. napätia.

Vnútorňý zdroj energie

- Na napájanie odsávačky z vnútorného zdroja energie použite 4 ks alkalickéj batérie typu LR6/AA (4x 1,5 V).
- Uistite sa, či je motorová jednotka **A17** odpojená od sieťovej zásuvky. Zo spodnej strany motorovej jednotky **A17** odoberte kryt priestoru na vloženie batérií **B14**. Priestor na batérie **B14** je vybavený textilnou páskou na jednoduchšie vybratie batérií. Pred vkladáním batérií natiahnite túto pásku v rámci priestoru na batérie **B14** a jej voľný koniec pridržiňte palcom. Do priestoru na batérie **B14** postupne vložte batérie a dbajte na ich správnu polaritu. Pásku uvoľnite a kryt uzavrite.

Poznámka:

Nekombinujte nové a použité batérie alebo batérie rôzneho typu, napr. alkalické batérie a dobijacie batérie.

Pokyny na používanie zdroja napájania

- Po pripojení motorovej jednotky **A17** k vonkajšiemu zdroju el. energie alebo vložení batérií sa na displeji **B1** krátko zobrazia všetky segmenty a potom sa motorová jednotka **A17** prepne do režimu Stand-by.
- Ak sa odsávačka napája z vnútorného zdroja el. energie, na displeji **B1** sa bude zobrazovať stav nabitia batérií **B2**.
- Približný čas prevádzky odsávačky pri použití nových batérií je 60 minút. Zhruba po 60 minútach prevádzky dôjde k poklesu intenzity odsávania a aj v prípade, že indikátor stavu nabitia batérií **B2** stále zobrazuje 2 segmenty, batérie môžu byť slabé a je potrebné ich vymeniť za nové. V prípade, že indikátor stavu nabitia batérií **B2** bliká, kapacita batérií je takmer vyčerpaná. Vymeňte batérie.
- V prípade, že odsávačku nebudete používať dlhší čas, odporúčame z nej batérie vybrať.
- Ak pripojíte motorovú jednotku **A17**, v ktorej sú vložené batérie, k sieťovej zásuvke ako primárny zdroj napájania sa použije vonkajší zdroj el. energie. No neodporúčame napájať motorovú jednotku **A17** zo sieťovej zásuvky, ak sú v nej súčasne vložené batérie. V takom prípade batérie najskôr vyberte. Pred vybratím batérií odpojte motorovú jednotku **A17** od sieťovej zásuvky.

Použitie odsávačky

1. Pred odsávaním materského mlieka si dôkladne umyte ruky a prsník utrite frotírovou rukavicou (najlepšie jednorazovou) navlhčenou v čistej teplej vode.
2. Pohodlne sa posadíte na stoličku alebo do kresla a chrbát si oprite o opierku. Odsávanie nie je vhodné vykonávať v predklone. Odsávačku vyberte zo stojančeka **A19**. Prsný násadec **A2** priložte k prsníku tak, aby bradavka bola umiestnená uprostred násadca **A2**. Palcom a ukazováčikom pridržiujte násadec **A2** pri prsníku a dlaňou rovnakej ruky prsník podoprite. Prsný násadec **A2** musí dokonale prilipnúť k prsníku.

3. Na ovládacom paneli motorovej jednotky A¹⁷ stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie B¹¹. Pri prvom spustení sa na displeji B¹ zobrazí údaj B³ – „Stimulation“ a odsávačka sa spustí v režime stimulácie. Fáza stimulácie trvá 2 minúty. Intenzita vákua v režime stimulácie je prednastavená na najnižší stupeň 1. To je signalizované zobrazením zodpovedajúceho počtu segmentov na stupnici B⁵. Na displeji B¹ sa zobrazuje východiskový čas 30 minút. V minútových intervaloch sa odpočítava čas zostávajúci do automatického vypnutia odsávačky. Intenzitu vákua môžete ľubovoľne regulovať v rozsahu 1 až 9. Nastavenie intenzity sa bude zobrazovať na stupnici B⁵. V režime stimulácie je prednastavená nemenná rýchlosť, ktorá zodpovedá 100 cyklom za minútu.
4. Po ukončení fázy stimulácie sa odsávačka automaticky prepne do režimu odsávania. Ak začne mlieko vytekať skôr, prepnite odsávačku do režimu odsávania stlačením tlačidla B¹⁰. Na displeji B¹ sa zobrazí údaj B⁴ – „Expression“. Intenzita vákua je v režime odsávania prednastavená na stupeň 4 a môžete ju ľubovoľne meniť v rozsahu 1 až 9. Na stupnici B⁵ sa bude zobrazovať zodpovedajúci počet segmentov. Rýchlosť odsávania sa mení automaticky podľa nastavenia intenzity vákua a je zobrazená na stupnici B⁷. Na displeji B¹ sa stále odpočítava čas zostávajúci do automatického vypnutia.
5. Po ukončení odsávania vypnite motorovú jednotku A¹⁷ stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia B¹¹.

Poznámka:

Pri ďalšom spustení odsávačky sa obnoví režim, v ktorom bola odsávačka spustená pred vypnutím, a vaše posledné nastavenie intenzity vákua. Ak boli pred ďalším spustením vybrané batérie alebo bola odsávačka odpojená od vonkajšieho zdroja energie, obnoví sa východiskové nastavenie ako pri prvom spustení.

6. Prsník vyberte z násadca A² vždy až po vypnutí motorovej jednotky A¹⁷. Flaštičku A¹² s odsatým mliekom postavte do stojančeka A¹³, aby nedošlo k jej prevrhnutiu. Ak používate externý zdroj napájania, motorovú jednotku A¹⁷ odpojte od sieťovej zásuvky. Flaštičku A¹² vyskrutkujte z konektora A⁴ a uzavrite ju viečkom A¹⁰.

Poznámka:

Flaštičku A¹² nenaplnujte väčším množstvom mlieka než 120 ml, aby ste sa vyhlí jeho rozliatiu.

7. Po ukončení odsávania vyčistite všetky použité súčasti podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a sterilizácia. Flaštičku A¹² s viečkom A¹⁰ vyčistite neskôr, až po spotrebovaní jej obsahu.

Tipy a rady na používanie odsávačky

- Ak cítite nepríjemný tlak, intenzitu vákua znížte.
- Podľa potreby môžete mlieko odsáť najskôr z jedného prsníka a potom pokračovať odsávaním z druhého prsníka. Pred odobratím odsávačky z prsníka je nutné motorovú jednotku A¹⁷ vypnúť a až potom uvoľniť prsník z násadca A². Potom môžete pokračovať odsávaním z druhého prsníka.
- Ak sa vám nedarí odsáť žiadne mlieko v časovom intervale zhruba 5 minút, odsávanie prerušte. Skúste najprv chvíľu relaxovať a nahriať prsia v teplej sprche. Potom sa pokúste znovu odsáť mlieko alebo odložte odsávanie na neskôr, až sa vytvorí ďalšie mlieko.
- Na odsatie mlieka by malo obvykle stačiť 10 minút. Tento čas je však iba orientačný a môže sa individuálne líšiť.

Skladovanie a ohrievanie materského mlieka

- Na skladovanie je vhodné iba materské mlieko, ktoré bolo získané čistou a sterilizovanou odsávačkou. Mlieko skladujte v sterilizovaných nádobkách určených na skladovanie materského mlieka alebo v špeciálnych jednorazových vrecúškach na uskladnenie materského mlieka.
- Nádobky alebo vrecká riadne uzavrite pred uložením do chladničky alebo mrazničky, aby nedošlo k rozliatiu mlieka alebo aby mlieko neabsorbovalo iné pachy z priestoru, v ktorom je uložené.
- Materské mlieko je možné skladovať až 48 hodín v chladničke (okrem dverného priestoru) a až 3 mesiace v mrazničke pri teplote –18 °C.

- Ak odsávate mlieko postupne a chcete zmiešať jednotlivé dávky do jednej nádoby a zamraziť ich, urobte tak najneskôr do 24 hodín. Zmiešať je možné iba také dávky mlieka, ktoré sú ochladené na rovnakú teplotu.
- Nádoby alebo vrecká, ktoré ukladáte do mrazničky, si označte dátumom.

Poznámka:

Fľaštičku A⑫ s viečkom A⑩ je možné skladovať v chladničke aj mrazničke.

- Pred podaním dojčatú by sa malo ohriať materské mlieko na teplotu cca 37 °C. Zmrazené mlieko môžete nechať cez noc rozmraziť v chladničke. Rozmrazovanie v chladničke nesmie však trvať dlhšie než 24 hodín. Mlieko ohrievajte šetrne v ohrievači detských fliaš alebo v nádobe s teplou vodou. Nepoužívajte vriacu vodu, pretože by mohlo dôjsť k znehodnoteniu výživných látok vplyvom vysokej teploty. Na ohrev nie je príliš vhodná ani mikrovlnná rúra, a to z dôvodu nerovnomerného ohriatia.
- Všetky súčasti fľaštičky, z ktorej sa mlieko dojčatú podáva, musia byť vysterilizované pred tým, než prídu do kontaktu s materským mliekom. Na zostavenie dojčenskej fľaštičky, ktorá je súčasťou dodávky odsávačky, vložte cumlík A⑪ do skrutkovacieho krúžku A⑥ a potom pripevnite krúžok A⑥ k fľaške A⑫. Ak chcete použiť na kŕmenie dojčenskú fľaštičku s úzkym otvorom, k skrutkovaciemu krúžku A⑥ pripevnite zospodu redukciu A⑨ a túto zostavu potom naskrutkujte na príslušnú fľašu. Podľa potreby môžete použiť inú dojčenskú fľašu s cumlíkom. Pred kŕmením vždy najskôr pretrepte fľašu a skontrolujte teplotu mlieka. Nespotrebované mlieko, ktoré sa raz rozmrazilo alebo ohrialo, zlikvidujte.

Riešenie problémov

V tejto kapitole nájdete možné riešenia problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní odsávačky. Ak sa vám nepodarí odstrániť problém podľa nasledujúcich pokynov, kontaktujte, prosím, autorizované servisné stredisko.

- Po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia B⑪ sa odsávačka nespustí.
 - Overté, či je motorová jednotka A⑰ pripojená k funkčnej sieťovej zásuvke. V prípade použitia vnútorného zdroja napájania overte, či sú batérie vložené podľa správnej polarität a nie sú vybité.
- Nízka alebo žiadna intenzita odsávania
 - Overté, či je odsávačka správne zostavená a či sú jednotlivé časti k sebe riadne pripojené. Spojte medzi jednotlivými časťami odsávačky nesmú byť uvoľnené.
 - Slabé alebo takmer vybité batérie. Aj keď indikátor stavu nabitia batérií B② stále zobrazuje 2 segmenty, batérie môžu byť slabé a je potrebné ich vymeniť za nové.
 - Uistite sa, že prsný násadec A② riadne prilipol k prsníku. Odsávačku nedržte za konektor A④. Odsávajte v sede a držte rovný chrbát. Prsný násadec A② pridržujte pri prsníku palcom a ukazováčikom a prsník podpierajte dlaňou.
 - Overté, či silikónová hadička A⑱ nie je skrútená alebo či v nej nie je voda. Všetky komponenty odsávačky musia byť pred začatím odsávania suché a silikónová hadička A⑱ nesmie byť zohýbaná. Ak je v silikónovej hadičke A⑱ voda, môžete použiť suchú hadičku z náhradného príslušenstva.

Čistenie a sterilizácia

Čistenie odsávačky

- Uistite sa, či je odsávačka vypnutá a odpojená od sieťovej zásuvky. Odsávačku demontujte na jednotlivé súčasti, pozrite kapitolu Zostavenie odsávačky a jej demontáž.

Poznámka:

Na účely čistenia nie je potrebné demontovať chlopňu A(7) z ventilu A(6).

- Pred prvým použitím a po každom použití:
 - Dôkladne umyte kryt prsného násadca A(1), prsný násadec A(2), výstuhu prsného násadca A(3), membránu A(16), konektor A(4), fľaštičku A(12), skrutkovacie viečko A(10), stojanček A(13), krúžok na cumlík A(8), redukciu krúžku A(9), cumlík A(11) a jeho kryt A(5) v teplej pitnej vode s použitím jemného umývacieho prostriedku na riad. Potom všetky tieto časti riadne opláchnite pod čistou pitnou vodou a osušte čistou utierkou alebo ich nechajte voľne uschnúť. Vyššie uvedené časti môžete zároveň nechať umyť v umývačke riadu (v hornom koši).

Poznámka:

Ak nepoužívate napríklad krúžok na cumlík A(8), redukciu krúžku A(9) alebo cumlík A(11), stačí tieto časti vyčistiť až pred plánovaným použitím.

- Umyte ventil s chlopňou A(6)–(7) opatrne v teplej pitnej vode s použitím jemného umývacieho prostriedku na riad. Potom ho opláchnite pod čistou pitnou vodou a opatrne osušte čistou utierkou alebo ho nechajte voľne uschnúť na čistej utierke.
- Utrite viečko A(14) a hadičku A(18) s pripavenými konektormi A(19) čistou mierne navlhčenou handričkou. Obe časti potom osušte čistou utierkou. Tieto časti neprichádzajú do styku s materským mliekom ani prsníkom, a preto ich nie je potrebné umývať pod tečúcou vodou. Ak však tieto časti umyjete, bude potrebné pred ďalším použitím vyčakať, až vyschne voda, ktorá sa dostala dovnútra hadičky A(18) alebo viečka A(14).
- Motorovú jednotku A(17) a adaptér A(20) nikdy neoplachujte pod tečúcou vodou ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny. V prípade znečistenia môžete povrch motorovej jednotky A(17) utrieť čistou mierne navlhčenou handričkou a potom osušiť.

Sterilizácia odsávačky

- Pred prvým a každým ďalším použitím:
 - Vysterilizujte kryt prsného násadca A(1), prsný násadec A(2), výstuhu prsného násadca A(3), membránu A(16), konektor A(4), ventil s chlopňou A(6)–(7), fľaštičku A(12), skrutkovacie viečko A(10), krúžok na cumlík A(8), redukciu krúžku A(9), cumlík A(11) a jeho kryt A(5) v parnom sterilizátore alebo vyvarením v hrnci na cca 5 minút.



Upozornenie:

Všetky súčasti musia byť pred sterilizáciou čisté. Pokyny na čistenie sú uvedené v predchádzajúcej podkapitole Čistenie odsávačky.

- Stojanček na fľaštičku A(13) a viečko A(14) nie je potrebné sterilizovať, pretože tieto časti neprichádzajú do kontaktu s materským mliekom ani prsníkom.
- Motorovú jednotku A(17), sieťový adaptér A(20), silikónovú hadičku A(18) a konektory A(19) nesterilizujte. Tieto časti neprichádzajú do kontaktu s materským mliekom ani prsníkom. Sterilizácia by poškodila motorovú jednotku A(17) a sieťový adaptér A(20).

Skladovanie

- Vyčistenú odsávačku uložte napr. do čistej škatuľky alebo ju zabaľte do čistej utierky, aby sa na ňu neprášilo. Odsávačku môžete skladovať rozobranú alebo zostavenú. Na ochranu pred prachom môžete nasadiť kryt A① na prsný násadec A②.

Technické špecifikácie

Modelové označenie.....	BBP 1010
Napätie a príkon	6 V $\overline{\text{---}}$, 3,6 W
Napájanie	sieťový adaptér, typové označenie: GEO101T-0610, vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, výstup: 6 V $\overline{\text{---}}$, 1 A alebo 4x LR6/AA batérie (nie sú súčasťou dodávky)
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.....	Motorová jednotka – trieda ochrany III Adaptér – trieda ochrany II
Hlučnosť.....	60 dB(A)
Intenzita vákua.....	Max. –0,016 MPa (režim stimulácie) Max. –0,034 MPa (režim odsávania)
Rýchlosť stimulácie/odsávania.....	100 cyklov/min (režim stimulácie) 26 až 60 cyklov/min (režim odsávania)
Časovač automatického vypnutia	30 min
Prevádzkové podmienky.....	Okolitá teplota: 5 až 40 °C Relatívna vlhkosť: ≤ 90 %

Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale



Tento symbol označuje, že pred použitím výrobku si má používateľ prečítať návod na obsluhu.



Tento symbol označuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol označuje, že ide o zariadenie triedy ochrany III.



Tento symbol označuje, že ide o zariadenie triedy ochrany II.



Tento symbol označuje polaritu konektora napájacieho kábla.



Tento symbol označuje, že ide o výrobok, ktorý sa smie používať iba v interiéri.



Tento symbol slúži na označenie výrobnej šarže.



Tento symbol označuje, že za obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zaisťujúcej spätný odber a využitie obalového odpadu.



Tento symbol označuje materiál, z ktorého je obal vyrobený.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Likvidácia použitých batérií



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, preto nepatria do bežného domového odpadu. Batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, ktoré zaisťujú ich ekologickú likvidáciu. Kontakt na najbližšie zberné miesto si vyžiadajte na obecnom úrade alebo u svojho predajcu.

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.